



RELENZA

瑞樂沙旋達碟 本藥限由醫師處方使用

ZANAMIVIR FOR INHALATION

此份資料將教導病患您如何使用瑞樂沙旋達碟。

碟式吸入器 內部零件圖



瑞樂沙旋達碟 Relenza Rotadisk 重要使用安全資訊：

1. 使用本藥後，若症狀未改善或出現其他不舒服的症狀時，請告知您的醫生或藥師。
2. 使用本藥後，若發生嚴重的呼吸道症狀(如：呼吸急促、呼吸困難)，請立即停用本藥，並聯絡醫生或前往鄰近的醫院請求協助。
3. 將其他吸入用藥(如速效性支氣管擴張劑)和RELENZA同時使用的患者，應建議其先使用該藥再使用RELENZA。
4. 併有呼吸道疾病的患者在使用Relenza時，應隨時備妥速效性支氣管擴張劑。






RELENZA

ZANAMIVIR FOR INHALATION

瑞樂沙旋達碟 使用流程

一、裝置旋達碟

1. 脫開藍色外殼
4. 裝入一片新的旋達碟於轉輪上，印刷面朝上

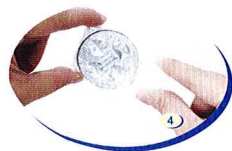

2. 拉開白色托盤
5. 將裝有旋達碟的白色托盤推回原位



3. 壓住兩側的凸起條紋來將白色托盤脫離主體



重複步驟一，
四顆藥囊用畢，

建議劑量
**早晚一次
每次兩劑**

二、吸入前準備

1. 水平檢查吸口內、外側是否清潔



2. 將折蓋拉起至垂直後推回，如此可刺破一個藥囊。確保旋達碟維持水平直到吸藥完成



三、連續吸入兩劑量

1. 於舒適狀態下盡量呼氣，此時將吸入器遠離嘴巴



3. 拉出白色托盤後並推回白色托盤，此動作會將下一個藥囊推向刺針下方



2. 將吸口置於上下牙齒間，並維持吸入器的水平。緊閉雙唇包住吸口，但不要咬或將吸口兩側的氣孔堵住。

透過吸口做一個快且深的吸氣來吸入藥劑。握住呼吸2秒並將吸入器移開嘴巴



4. 折蓋拉起至垂直並推回，刺破第二個藥囊，準備吸藥



5. 吸入第二劑

重複步驟三裡的1,2,3



四、結束用藥

1. 水平檢查吸口內、外側是否清潔
2. 蓋回藍色外殼



荷商葛蘭素史克藥廠(股)公司台灣分公司

台北市忠孝西路一段66號24樓 電話:02-2381-8866 傳真:02-23120812 網址:www.gsk.tw

本資料由GSK藥廠提供 使用前詳閱說明書警語及注意事項 PM-TW-ZNM-BROC-190001-Oct-2019

©2019 GSK group of companies or its licensor. TM Statement-Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies 不良反應通報信箱: oax40892@gsk.com 此衛教文宣僅供醫護人員使用